

Gel 電極(フックタイプ)装着手順

810E, 810F タイプ

- ①フック電極ケーブル
- ②Gel 電極チップ
- ③Gel フックカップ



- ④ヘッドバンド
- ⑤Gel バンド (長・短) ※頭部のサイズに合う方を使用してください。




【手順 1】

Gel 電極チップを Gel ホックカップに取り付けます。



【手順 2】

Gel バンドを挟むように Gel ホックカップとホック電極ケーブルを装着します。
※Gel バンドのマジックテープ側に Gel 電極チップがくるように装着します。

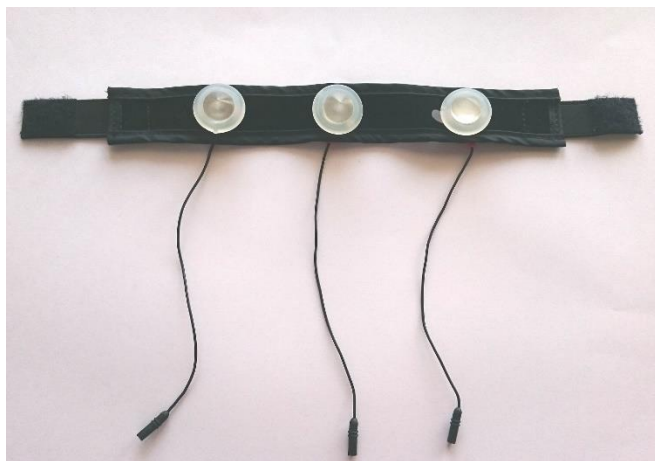

【手順 3】

ヘッドバンドを頭に装着します。頭部のサイズに合わせて長さを調整します。



【手順 4】

Gel 電極チップの接触部位の髪を必要に応じて掻き分け、綿棒などでアルコール清拭し、表皮の皮脂を取り除いてください。



【手順 5】

Gel バンドを装着します。

Gel 電極チップを頭皮に押し付け、ヘッドバンドにマジックテープで固定します。



【手順 6】

脳波計に接続します。中継ケーブルを接続し、脳波計に接続します。

ホック電極ケーブルを脳波計
又は中継ケーブルに接続

